

ELBO-TRACK | JUNIOR


PATIENTENINFORMATION



albrecht[®]
FUNKTIONELLE REHABILITATION

Anlegen der Orthese

- 1 Legen Sie die Schiene von unten an Ihrem Arm an, wie vom Orthopädietechniker angepasst
- 2 Schließen Sie zuerst den schmalen Oberarmgurt.
- 3 Schließen Sie die beiden Unterarmgurte.
- 4 Schließen Sie zunächst den breiten, elastischen Oberarmgurt.

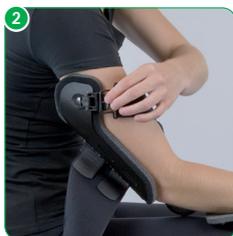


Das Anlegen der Schiene für die Größe S/S (Junior) und XS/XS (Bambini) erfolgt identisch.



Ablegen der Orthese

- 1 Zum Abnehmen der Schiene lösen Sie zunächst den breiten, elastischen Oberarmgurt.
- 2 Lösen Sie im Anschluss die restlichen Gurte durch Öffnen der Clipverschlüsse.
- 3 Legen Sie die Schiene ab.

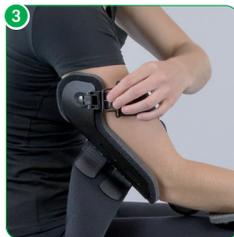

Das Ablegen der Schiene für die Größe S/S (Junior) und XS/XS (Bambini) erfolgt identisch.



Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes.

Reinigung und Desinfektion



Handwäsche
30°C



Nicht
Bleichen



Nicht
Bügeln



Nicht chem.
Reinigen



Nicht Trockner
geeignet

Polster und Gurte:

- Handwäsche bei 30°C mit mildem Waschmittel.
- keine Maschinenwäsche.
- Austauschsätze sind bei starken Verschmutzungen erhältlich.

Stützen (Gelenke):

- Mit feuchtem Tuch und mildem Waschmittel abwischen.
- Desinfizieren und vollständig benetzen, nicht nachwischen.



Website



Elbo-track



Digitale Version
Patienteninformation



Medical device
(Medizinprodukt)



albrecht[®]
FUNKTIONELLE REHABILITATION



Made in Germany
reguliert in Deutschland



Management
System
EN ISO
13485:2016
www.tuv.com
© TÜV Rheinland

albrecht GmbH • CHIEMSEESTRASSE 81 • D-83233 BERNAU AM CHIEMSEE
TELEFON: +49 (0) 8051 961 29 - 0 • TELEFAX: +49 (0) 8051 961 29 - 30 • EMAIL: INFO@ALBRECHTGMBH.COM
WWW.ALBRECHTGMBH.COM • INTERNATIONALE SERVICE-HOTLINE: 00800 0 303 29 - 00

Stand: 06.2025