

JUNIOR

MKS® Leibteil plus

Stabilisierungsothese mit Zugelementen und Aufrüstopption

HMV-Nr. 23.14.03.1019

Indikationen

- Schmerzzustand im LWS-Bereich
- LWS-Syndrom
- Lumbalgie
- Spondylarthrose
- ISG-Reizzustand
- Insuffizienz der Lendenmuskulatur

Merkmale

- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Festes Abdominalteil mit Klettverschluss
- Rückentasche für Noppenpelotte oder Rückenplatte der MKS® Osteo
- **Zirkulärer elastischer Zusatzgurt**

Funktionsweise

Das MKS® Leibteil / Leibteil plus passt sich durch das teilelastische Bandagenmaterial gut an den Körper an. Durch den aufgebauten zirkulären Druck wird die LWS gestützt. Das feste Verschlusselement sorgt hierbei für den erforderlichen Abdominaldruck, **der durch den Zusatzgurt verstärkt werden kann**. Optional kann eine Rückenplatte in die dafür vorgesehene Rückentasche eingeschoben werden.



Größentabelle und Artikelnummernübersicht

Größe	Junior	Bambini
Leibumfang	60 - 70 cm	50 - 60 cm
Leibhöhe	14 cm	14 cm
Rückenhöhe	18 cm	18 cm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	582-201NS-S	582-200NS-S



LWK 1 bis LWK 5

Bedeutung der Maßangaben

