

# taluar® Sprunggelenkschiene

## Sprunggelenksorthese zur Stabilisierung in einer Ebene

HMV-Nr. 23.02.02.0032

### Indikationen

- Postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion
- Konservative Therapie von Sprunggelenksdistorsionen aller Schweregrade
- Chronische Bandinstabilität
- Verletzung am Bandapparat des Sprunggelenks
- Schwere Distorsion bei laxer Bandsicherung
- Konservative oder funktionelle Nachbehandlung von Sprunggelenksfraktur und Bandverletzung

### Merkmale

- Anatomisch geformte Schalen
  - Luftpolster aus hautfreundlicher Polyurethanfolie
  - Innenliegender Polsterkern aus PU-Schaum
  - PVC-frei und frei von Weichmachern
  - In weiß verfügbar
- Optional durch Pronationszügel zur talupro® erweiterbar**

### Funktionsweise

Die taluar® stützt das Sprunggelenk medial und lateral und lässt Flexion und Extension weitestgehend zu. So kann ein normaler Bewegungsablauf erfolgen. Durch die Luftpolster in den Schalen wird unangenehmer Druck vermieden. Eine stärkere Unterpolsterung an beiden Knöcheln sorgt für einen höheren Druck im unteren Drittel der Auflagefläche. Dieser von unten nach oben abnehmende Druckverlauf hilft, Schwellungszustände schneller abzubauen.

### Größentabelle und Artikelnummernübersicht

taluar® – weiß

Größe	S	
Körpergröße	unter 158 cm	
	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts
weiß	600S-L	600S-R

Pronationszügel zum optionalen Erweitern auf talupro®

	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts
weiß	481-020-S	481-025-S



# Bedeutung der Maßangaben

