

Orthese zur Entlastung/Korrektur der LWS/BWS in Sagittal- und Frontalebene mit Mobilisierungsfunktion durch Auf- und Abrüstoption

HMV-Nr. 23.15.02.2002

Indikationen

- Stabile Wirbelkörperfraktur
- Morbus Scheuermann
- Tumor
- Spondylitis
- Schwere Lumboischialgie
- Schweres Lumbalsyndrom
- Spondylolisthese
- Facettensyndrom
- Spinalkanalstenose

Merkmale

- Reklinationsgurte
- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Festes Abdominalteil mit Mikroklettverschluss
- Umfang und Schnittform (Kontur) einstellbar
- Stabile Rahmenkonstruktion mit Thorax- und Beckenspanne
- Individueller Gurtverlauf



BWK 3 bis LWK 5















Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Lumbo plus basiert auf dem Reklinations- und Überbrückungsprinzip. Die beiden an der Rückenplatte befestigten Schultergurte richten die Wirbelsäule auf und entlasten dadurch die Brustwirbelsäule. Das breite Leibteil mit den zusätzlichen Seitengurten bewirkt eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und entlastet somit diesen Bereich. Durch einstellbaren Umfang und Kontur kann die Bandage unterschiedlichen Körperformen angepasst werden. Die Reklinationsgurte werden über zusätzliche seitliche Gurte mit dem Leibteil verbunden. Dadurch wird eine Rotationseinschränkung erreicht.

Größen und Artikelnummern

Größe	Standard	Extra
Leibumfang [cm]	70 - 95	95 - 125
vordere Höhe: 18 cm Rückenhöhe Reklination: 53-58 cm	786C-1	786C-2
vordere Höhe: 18 cm Rückenhöhe Reklination: 59-65 cm	786A-1	786A-2
vordere Höhe: 18 cm Rückenhöhe Reklination: 66-72 cm	786B-1	786B-2

Optionale Rückenstäbe (46 cm) – Art.-Nr.: 221-026-S (für Rückenhöhe Reklination 48 - 52 cm)

Teilebezeichnung	Art.-Nr.	Standardmäßig enthalten in den Produkten Art.-Nr. 786...						
		C1	A1	B1	C2	A2	B2	
MKS® Leibteil Vario Standard 70 - 95 cm	581-063-S	•	•	•				
MKS® Leibteil Vario Extra 95 - 125 cm	581-064-S				•	•	•	
MKS® Reklinationsstabset 51 cm	221-008-S	•			•			
MKS® Reklinationsstabset 58 cm	221-009-S		•			•		
MKS® Reklinationsstabset 65 cm	221-010-S			•			•	
MKS® Thoraxspange 45 cm	422-014-S	•	•	•				
MKS® Beckenspange 45 cm	422-015-S	•	•	•				
MKS® Thoraxspange 60 cm	422-012-S				•	•	•	
MKS® Beckenspange 60 cm	422-013-S				•	•	•	
MKS® Lumbo Schulterplatte	422-010-S	•	•	•	•	•	•	
MKS® Lumbo plus Schultergurtset	786-gt	•	•	•	•	•	•	
MKS® Lumbo Rückenabdeckung Höhe 1	422-016-S	•	•		•	•		
MKS® Lumbo Rückenabdeckung Höhe 2	422-017-S			•			•	
MKS® Gurt-schlaufensteg	761-001-S	•	•	•	•	•	•	

Bei Bestellungen bitte kopieren
und ausgefüllt senden.
E-Mail: info@albrechtgmbh.com
Fax: 08051-961 29 30

Maßblatt Rumpf

Bestellung Kostenvoranschlag

Datum: _____

Sanitätshaus: _____


Kundennummer: _____

Orthopädietechniker: _____

Patienten ID: _____

Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: _____

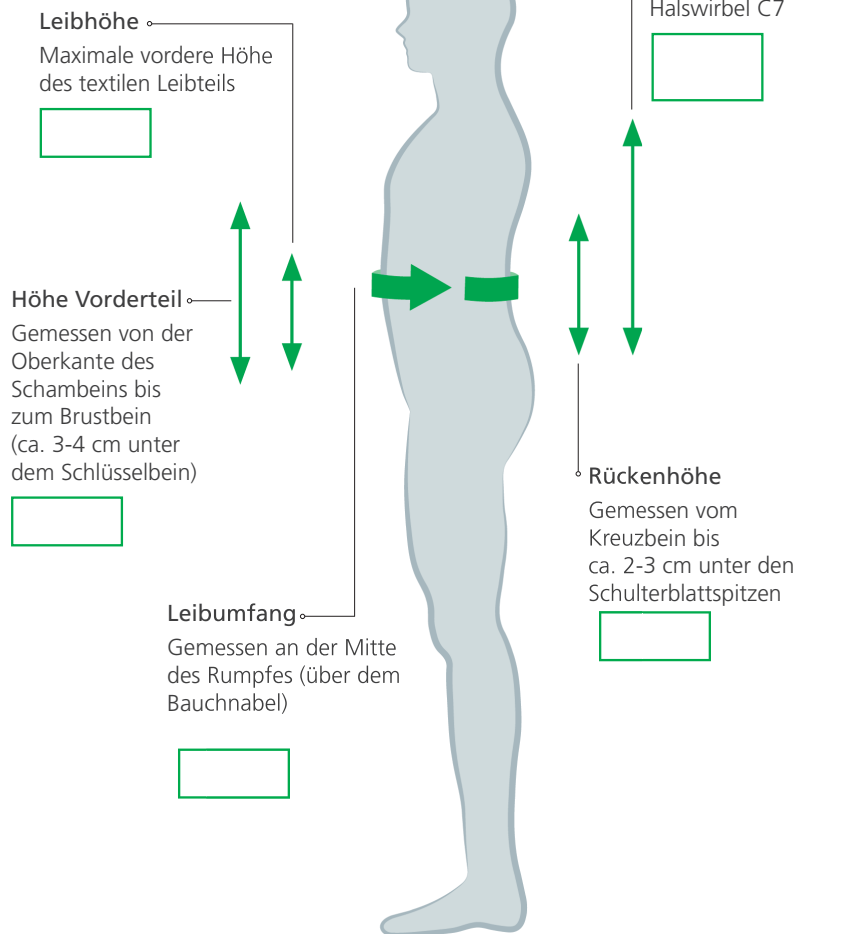

Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

- Größenmodifikation
- modulare Änderung

Art.-Nr.: _____

Freigabe: _____