

## Variable Stabilisierungsothese sowie Auf- und Abrüstoption und Pelotte

HMV-Nr. 23.14.03.2046

### Indikationen

- Stärkerer Schmerzzustand im LWS-Bereich
- Schwere Lumbalgie
- Rezidivierende Lumbalgie
- Osteochondrose
- Spondylolyse ohne Wirbelgleiten
- Leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten)
- LWS-Syndrom
- Spondylarthrose
- ISG-Reizzustand
- Insuffizienz der Lendenmuskulatur

### Merkmale

- Durch den 3-teiligen Aufbau ist die Bandage individuell an die jeweilige Körperform anpassbar
- Noppenpelotte
- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Rückentasche für Noppenpelotte oder Rückenplatte der MKS® Osteo
- Festes Abdominalteil mit Mikrolettverschluss



Noppenpelotte



LWK 1 bis LWK 5

### Funktionsweise

Die MKS® Lumbago Vario passt sich durch das teilelastische Bandagenmaterial gut an den Körper an. Durch den aufgebauten zirkulären Druck wird die LWS gestützt. Das feste Verschlusselement sorgt hierbei für den erforderlichen Abdominaldruck. In der Rückentasche befindet sich eine durchblutungsfördernde Noppenpelotte aus weichem Silikon.

### Größen und Artikelnummern

Größe	Standard	Extra
Leibumfang [cm]	70 - 95	95 - 125
vordere Höhe [cm]	18	18
Rückenhöhe [cm]	25	25
Art.-Nr.	581-069-S	581-070-S

### Aufbau

Die MKS® Lumbago Vario setzt sich aus zwei Seitenteilen, dem Mittelteil und der textilen Abdeckung zusammen. Somit kann die Bandage unterschiedlichen Körperformen angepasst werden. Je nach benötigtem Umfang und gewünschter Form werden die beiden Seitenteile symmetrisch auf das Mittelteil geklettet. Die aufgenähten Markierungen dienen hierbei zur Orientierung.



# Maßblatt Rumpf

Bei Bestellungen bitte kopieren  
und ausgefüllt senden.  
E-Mail: info@albrechtgmbh.com  
Fax: 08051-961 29 30

Bestellung       Kostenvoranschlag

Datum: \_\_\_\_\_

Sanitätshaus: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Orthopädietechniker: \_\_\_\_\_

Patienten ID: \_\_\_\_\_

## Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: \_\_\_\_\_

**Leibhöhe**  
Maximale vordere Höhe  
des textilen Leibteils

**Höhe Vorderteil**  
Gemessen von der  
Oberkante des  
Schambeins bis  
zum Brustbein  
(ca. 3-4 cm unter  
dem Schlüsselbein)

**Leibumfang**  
Gemessen an der Mitte  
des Rumpfes (über dem  
Bauchnabel)

**Rückenhöhe  
Reklination**  
Gemessen vom  
Kreuzbein  
(Anfang Gesäßfalte)  
bis ca. 2-3 cm unter  
Halswirbel C7

**Rückenhöhe**  
Gemessen vom  
Kreuzbein bis  
ca. 2-3 cm unter den  
Schulterblattspitzen



## Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

- Größenmodifikation
- modulare Änderung

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Freigabe: \_\_\_\_\_