


Orthese zur Entlastung/Korrektur der LWS/BWS in Sagittal- und Frontalebene mit Mobilisierungsfunktion durch Auf- und Abrüstoption

HMV-Nr. 23.15.02.2004
JUNIOR 23.15.02.2004

Größen  Dieses Produkt ist auch in Kindergrößen verfügbar.

Indikationen

- Stabile Wirbelkörperfraktur
- Morbus Scheuermann
- Postoperative Stabilisierung
- Tumor
- Spondylitis
- Schwere Lumboischialgie
- Schweres Lumbalsyndrom
- Spondylolisthese
- Facettensyndrom
- Spinalkanalstenose

Merkmale

- Festes, hohes Abdominalteil mit geteiltem Klettverschluss
- Reklinationsgurte
- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Modulare Rahmenkonstruktion mit Thorax- und Beckenspanne
- Individueller Gurtverlauf















Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Lumbo forte plus basiert auf dem Reklinations- und Überbrückungsprinzip. Die beiden an der Rückenplatte befestigten Schultergurte richten die Wirbelsäule auf und entlasten dadurch die Brustwirbelsäule. Das breite und hohe Leibteil mit den zusätzlichen Seitengurten bewirkt eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und entlastet somit diesen Bereich. Die Reklinationsgurte werden über zusätzliche seitliche Gurte mit dem Leibteil verbunden. Dadurch wird eine Rotationseinschränkung erreicht.

Größen und Artikelnummern

Größe	1	2	3	4	5	6
Leibumfang [cm]	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 105	105 - 120	120 - 135
vordere Höhe: 25 cm Rückenhöhe Reklination: 53-58 cm	788-10	788-20	788-30	788-40	788-50	788-60
vordere Höhe: 25 cm Rückenhöhe Reklination: 59-65 cm	788-11	788-21	788-31	788-41	788-51	788-61
vordere Höhe: 25 cm Rückenhöhe Reklination: 66-72 cm	788-12	788-22	788-32	788-42	788-52	788-62

Optionale Rückenstäbe (46 cm) – Art.-Nr.: 221-026-S (für Rückenhöhe Reklination 48 - 52 cm)

Teilebezeichnung	Art.-Nr.	Standardmäßig enthalten in den Produkten Art.-Nr. 788...																		
		10	20	30	40	50	60	11	21	31	41	51	61	12	22	32	42		52	62
MKS® Thoraxspange 45 cm	422-014-S	•	•	•				•	•	•				•	•	•				
MKS® Beckenspange 45 cm	422-015-S	•	•	•				•	•	•				•	•	•				
MKS® Thoraxspange 60 cm	422-012-S				•	•	•				•	•	•				•	•	•	
MKS® Beckenspange 60 cm	422-013-S				•	•	•				•	•	•				•	•	•	
MKS® Reklinationsstabset 51 cm	221-008-S	•	•	•	•	•	•													
MKS® Reklinationsstabset 58 cm	221-009-S							•	•	•	•	•	•							
MKS® Reklinationsstabset 65 cm	221-010-S													•	•	•	•	•	•	
MKS® Lumbo Schulterplatte	422-010-S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MKS® Lumbo forte plus Gurtset	788-gt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Leibteil Lumbo forte 11	581-101-S	•						•												
Leibteil Lumbo forte 21	581-102-S		•							•										
Leibteil Lumbo forte 31	581-103-S			•							•									
Leibteil Lumbo forte 41	581-104-S				•							•								
Leibteil Lumbo forte 51	581-105-S					•						•								
Leibteil Lumbo forte 61	581-106-S						•						•							
Leibteil Lumbo forte 12	581-107-S													•						
Leibteil Lumbo forte 22	581-108-S														•					
Leibteil Lumbo forte 32	581-109-S															•				
Leibteil Lumbo forte 42	581-110-S																•			
Leibteil Lumbo forte 52	581-111-S																	•		
Leibteil Lumbo forte 62	581-112-S																		•	
MKS® Lumbo Rückenabdeckung Höhe 1	422-016-S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
MKS® Lumbo Rückenabdeckung Höhe 2	422-017-S													•	•	•	•	•	•	
MKS® Gurtschlaufensteg	761-001-S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Maßblatt Rumpf

Bei Bestellungen bitte kopieren und ausgefüllt senden.
 E-Mail: info@albrechtgmbh.com
 Fax: 08051-961 29 30

Bestellung Kostenvoranschlag

Datum: _____

Sanitätshaus: _____


Kundennummer: _____

Orthopädietechniker: _____

Patienten ID: _____

Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: _____

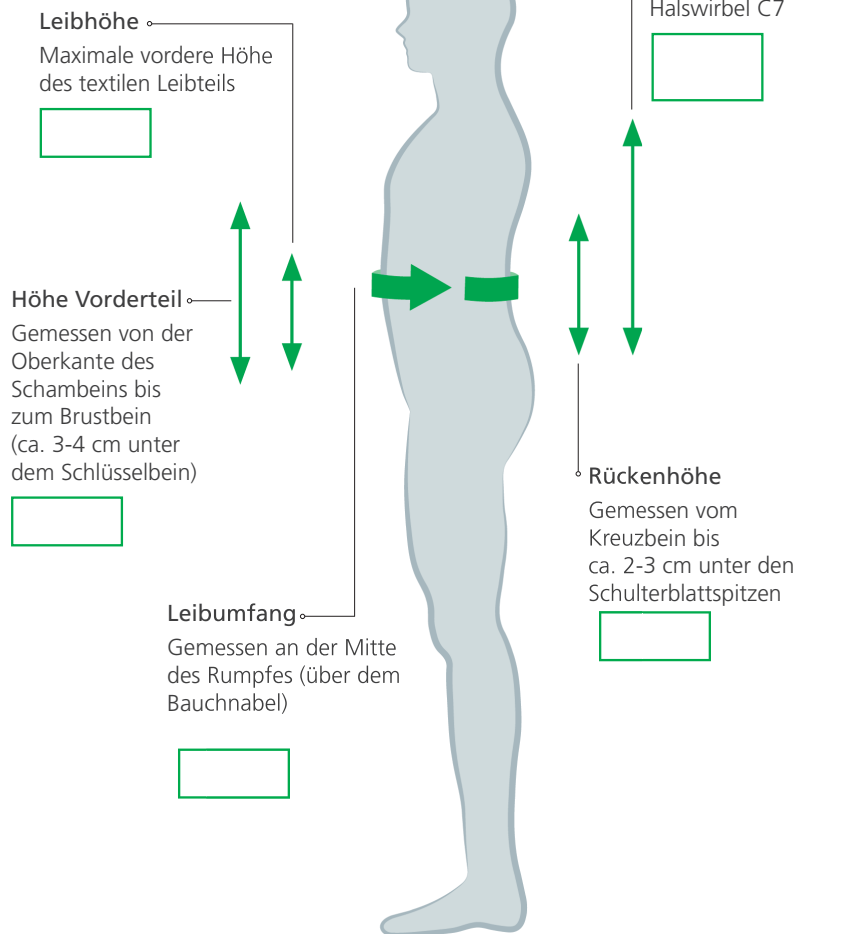

Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

Größenmodifikation

modulare Änderung

Art.-Nr.: _____

Freigabe: _____