


## Orthese zur aktiven Entlastung und Korrektur der LWS/BWS in Sagittalebene mit Auf- und Abrüstoption

**HMV-Nr.** 23.15.04.4006  
JUNIOR 23.15.04.4006

**Größen**  Dieses Produkt ist auch in Kindergrößen verfügbar.

### Indikationen

- Stabile, osteoporotische und traumatische Wirbelkörperfraktur
- Schmerzen durch Fehlhaltung, z.B. Rundrücken
- Spondylodiscitis
- Tumor
- Nach Bandscheiben-OP
- Muskuläre Insuffizienz
- Spondylitis
- Wirbelvorderkantenfraktur
- Sinterfraktur
- Osteoporose
- Chronische Lumbalgie durch Hyperlordose
- Facettensyndrom
- Degenerative Veränderung der LWS und BWS
- Haltunginsuffizienz
- Hohlrundrücken

### Merkmale

- Zirkulärer elastischer Zusatzgurt
- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Festes Abdominalteil mit Mikroklettverschluss
- Anpassbare Rückenplatte mit Aluminiumprofil
- Individueller Gurtverlauf
- Reklinationsgurte



### Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Osteo plus basiert auf dem Reklinationsprinzip. Die beiden an der Rückenplatte befestigten Schultergurte richten die Wirbelsäule auf und entlasten dadurch die Brustwirbelsäule. Das breite Leibteil bewirkt eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und entlastet somit diesen Bereich. Durch den zirkulären Zusatzgurt kann zusätzliche zirkuläre Kompression ausgeübt werden. Die Reklinationsgurte werden über zusätzliche seitliche Gurte mit dem Leibteil verbunden. Dadurch wird eine Rotationseinschränkung erreicht.

### Größen und Artikelnummern

Größe		1	2	3	4	5	6
<b>Leibumfang [cm]</b>		60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 105	105 - 120	120 - 135
<b>vordere Höhe [cm]</b>	18						
<b>Rückenhöhe Reklination [cm]</b>	S 46	784C-1	784C-2	784C-3	784C-4	784C-5	784C-6
	M 50	784A-1	784A-2	784A-3	784A-4	784A-5	784A-6
	L 56	784B-1	784B-2	784B-3	784B-4	784B-5	784B-6

### Reduzierte Höhe

vordere Höhe [cm]							
14							
<b>Rückenhöh Reklination [cm]</b>	XS 43	784D-1N	784D-2N	784D-3N	784D-4N	784D-5N	784D-6N
	S 46	784C-1N	784C-2N	784C-3N	784C-4N	784C-5N	784C-6N
	M 50	784A-1N	784A-2N	784A-3N	784A-4N	784A-5N	784A-6N
	L 56	784B-1N	784B-2N	784B-3N	784B-4N	784B-5N	784B-6N

## Einzelmodule für den modularen Zusammenbau

		Standardmäßig enthalten in den Produkten Art.-Nr. 784...																		
Teilbezeichnung	Art.-Nr.	C1	A1	B1	C2	A2	B2	C3	A3	B3	C4	A4	B4	C5	A5	B5	C6	A6	B6	
<b>Rückenplatte mit Reklinationsgurt</b>																				
S 46 cm	761-066-S	•			•			•			•			•			•			
M 50 cm	761-067-S		•			•			•			•			•			•		
L 56 cm	761-068-S			•			•			•			•			•			•	
<b>Leibteil Gr. 1 60 - 70 cm</b>	582-201-S	•	•	•																
<b>Leibteil Gr. 2 70 - 80 cm</b>	582-202-S				•	•	•													
<b>Leibteil Gr. 3 80 - 90 cm</b>	582-203-S							•	•	•										
<b>Leibteil Gr. 4 90 - 105 cm</b>	582-204-S										•	•	•							
<b>Leibteil Gr. 5 105 - 120 cm</b>	582-205-S													•	•	•				
<b>Leibteil Gr. 6 120 - 135 cm</b>	582-206-S																•	•	•	



### Reduzierte Höhe

		Standardmäßig enthalten in den Produkten Art.-Nr. 784...																								
Teilbezeichnung	Art.-Nr.	D1	C1	A1	B2	D2	C2	A2	B2	D3	C3	A3	B3	D4	C4	A4	B4	D5	C5	A5	B5	D6	C6	A6	B6	
<b>Rückenplatte mit Reklinationsgurt</b>																										
XS 43 cm	761-065-S	•				•				•				•				•				•			•	
S 46 cm	761-066-S		•				•				•				•				•				•			•
M 50 cm	761-067-S			•				•				•				•				•				•		
L 56 cm	761-068-S				•					•					•					•				•		
<b>Leibteil Gr. 1 60 - 70 cm</b>	582-201N-S	•	•	•	•																					
<b>Leibteil Gr. 2 70 - 80 cm</b>	582-202N-S					•	•	•	•																	
<b>Leibteil Gr. 3 80 - 90 cm</b>	582-203N-S									•	•	•	•													
<b>Leibteil Gr. 4 90 - 105 cm</b>	582-204N-S													•	•	•	•									
<b>Leibteil Gr. 5 105 - 120 cm</b>	582-205N-S																		•	•	•	•				
<b>Leibteil Gr. 6 120 - 135 cm</b>	582-206N-S																						•	•	•	•



# Maßblatt Rumpf

Bei Bestellungen bitte kopieren und ausgefüllt senden.  
 E-Mail: info@albrechtgmbh.com  
 Fax: 08051-961 29 30

Bestellung       Kostenvoranschlag

Datum: \_\_\_\_\_

Sanitätshaus: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Orthopädietechniker: \_\_\_\_\_

Patienten ID: \_\_\_\_\_

## Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: \_\_\_\_\_


**Leibhöhe**  
 Maximale vordere Höhe des textilen Leibteils

**Höhe Vorderteil**  
 Gemessen von der Oberkante des Schambeins bis zum Brustbein (ca. 3-4 cm unter dem Schlüsselbein)

**Leibumfang**  
 Gemessen an der Mitte des Rumpfes (über dem Bauchnabel)

**Rückenhöhe Reklination**  
 Gemessen vom Kreuzbein (Anfang Gesäßfalte) bis ca. 2-3 cm unter Halswirbel C7

**Rückenhöhe**  
 Gemessen vom Kreuzbein bis ca. 2-3 cm unter den Schulterblattspitzen

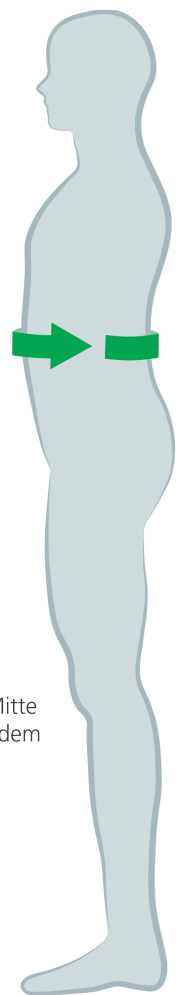

**Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)**

Größenmodifikation

modulare Änderung

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Freigabe: \_\_\_\_\_