


## Orthese zur Entlastung und/oder Korrektur der LWS /BWS in Sagittal- und Frontalebene mit Mobilisierungsfunktion durch Auf- und Abrüstoption

**HMV-Nr.** 23.15.02.2003  
JUNIOR 23.15.02.2003

**Größen**  Dieses Produkt ist auch in Kindergrößen verfügbar.

### Indikationen

- Stabile Wirbelkörperfraktur
- Morbus Scheuermann
- Postoperative Stabilisierung
- Tumor
- Spondylitis

### Merkmale

- Anpassbare, stabile Aluminiumprofile
- Gepolsterte Kunststoffpelotten
- Individueller Gurtverlauf
- Kompressionspolster oberhalb der Beckenkämme
- Zusätzliche, stabile Thoraxabstützung
- Reklinationsgurte
- Einfaches An- und Ablegen durch Clipverschluss



**Optional** kann die Lateralflexion durch die Glutaeusspange zusätzlich eingeschränkt werden.

### Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Thorecta plus basiert auf dem 3-Punkt- und Reklinationsprinzip. Front- und Rückenteil richten die Wirbelsäule auf und entlasten sie damit. Die breite Thoraxspange führt durch die zusätzliche Einschränkung der Lateralflexion zu noch höherer Immobilisierung und entlastet somit den gesamten Behandlungsbereich. Die Reklinationsgurte richten die Wirbelsäule auf und minimieren Rotationsbewegungen. Durch gezielte Kompression zwischen Beckenkamm und Thorax (Kirschkerneffekt) wird eine zusätzliche Entlastung der Lendenwirbelsäule erreicht.


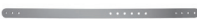













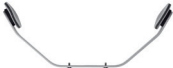


### Größen und Artikelnummern

Größe	S	M	L
Leibumfang [cm]	70 - 125	70 - 125	70 - 125
Höhe Vorderteil [cm]	40 - 47	48 - 53	54 - 59
Rückenhöhe Reklination [cm]	52 - 56	59 - 63	66 - 70
Art.-Nr.	751C	751A	751B

Optionaler Frontstab 32 cm – Art.-Nr.: 221-014-S (für Höhe Vorderteil 35 - 40 cm)

Optionale Reklinationsstäbe 46 cm – Art.-Nr.: 221-026-S (für Rückenhöhe Reklination 48 - 51 cm)

Teilebezeichnung	Art.-Nr.	Standardmäßig enthalten in den Produkten Art.-Nr. 751...			
		S	M	L	
MKS® Frontstab 38 cm	221-015-S	•			
MKS® Frontstab 44 cm	221-016-S		•		
MKS® Frontstab 50 cm	221-017-S			•	
MKS® Reklinationsstabset 51 cm	221-008-S	•			
MKS® Reklinationsstabset 58 cm	221-009-S		•		
MKS® Reklinationsstabset 65 cm	221-010-S			•	
MKS® Sternalpelotte	761-041-S	•	•	•	
MKS® Abdominalplatte	761-042-S	•	•	•	
MKS® Symphysenpelotte	761-043-S	•	•	•	
MKS® Abschlussplatte groß	761-044-S	•	•	••	
MKS® Thoraxabstützung	761-047-S	•	•	•	
MKS® Becken-/ Verschlusselement	761-046-S	•	•	•	
MKS® Abschlussplatte klein	761-045-S	•	•		
MKS® Gurtschleufe zweifach	451-001-S	•	•	•	
MKS® Thorecta plus Gurtset	751-gt	•	•	•	
MKS® Glutaeusspange (op- tional)	771-mp01				

# Maßblatt Rumpf

Bei Bestellungen bitte kopieren und ausgefüllt senden.  
 E-Mail: info@albrechtgmbh.com  
 Fax: 08051-961 29 30

Bestellung       Kostenvoranschlag

Datum: \_\_\_\_\_

Sanitätshaus: \_\_\_\_\_


Kundennummer: \_\_\_\_\_

Orthopädietechniker: \_\_\_\_\_

Patienten ID: \_\_\_\_\_

## Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: \_\_\_\_\_

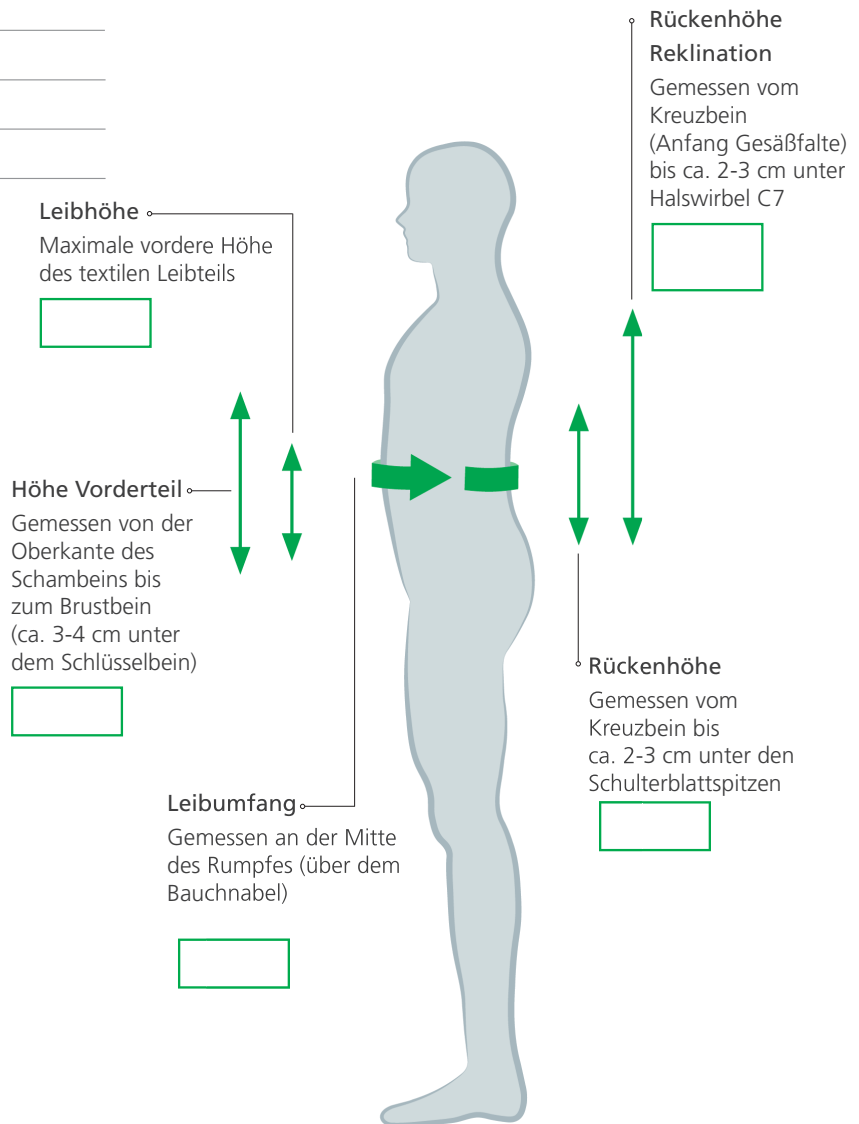

**Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)**

Größenmodifikation

modulare Änderung

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Freigabe: \_\_\_\_\_