


## Orthese zur Entlastung/Korrektur der LWS/BWS in Sagittal- und Frontalebene mit Mobilisierungsfunktion durch Auf- und Abrüstoption

**HMV-Nr.** 23.15.04.3003  
JUNIOR 23.15.04.3003

**Größen**  Dieses Produkt ist auch in Kindergrößen verfügbar.

### Indikationen

- Stabile Wirbelkörperfraktur
- Morbus Scheuermann
- Postoperative Stabilisierung
- Tumor
- Spondylitis

### Merkmale

- Anpassbare, stabile Aluminiumprofile
- Gepolsterte Kunststoffpelotten
- Individueller Gurtverlauf
- Kompressionspolster oberhalb der Beckenkämme
- Zusätzliche, stabile Thoraxabstützung
- Einfaches An- und Ablegen durch Clipverschluss



**Optional** kann die Lateralflexion durch die Glutaeusspange zusätzlich eingeschränkt werden.

### Funktionsweise
















Die Funktion der MKS® Thorecta basiert auf dem 3-Punkt-Prinzip. Front- und Rückenteil richten die Wirbelsäule auf und entlasten sie damit. Die breite Thoraxspange führt durch die zusätzliche Einschränkung der Lateralflexion zu noch höherer Immobilisierung und entlastet somit den gesamten Behandlungsbereich. Durch gezielte Kompression zwischen Beckenkamm und Thorax (Kirschkerneffekt) wird eine zusätzliche Entlastung der Lendenwirbelsäule erreicht.



### Größen und Artikelnummern

| Größe                | S        | M        | L        |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Leibumfang [cm]      | 70 - 125 | 70 - 125 | 70 - 125 |
| Höhe Vorderteil [cm] | 40 - 47  | 48 - 53  | 54 - 59  |
| Rückenhöhe [cm]      | 33 - 38  | 33 - 38  | 40 - 45  |
| Art.-Nr.             | 731C     | 731A     | 731B     |

Optionaler Frontstab 32 cm – Art.-Nr.: 221-014-5 (für Höhe Vorderteil 35 - 40 cm)

| Teilebezeichnung                     | Art.-Nr.  | Standardmäßig enthalten in den Produkten Art.-Nr. 731... |    |    |   |
|--------------------------------------|-----------|--|----|----|---|
|                                      |           | S  | M  | L  |   |
| MKS® Frontstab<br>38 cm              | 221-015-S | •  |    |    |    |
| MKS® Frontstab<br>44 cm              | 221-016-S |  | •  |    |    |
| MKS® Frontstab<br>50 cm              | 221-017-S |  |    | •  |    |
| MKS®<br>Rückenstabset<br>32 cm       | 221-006-S | •  | •  |    |    |
| MKS®<br>Rückenstabset<br>39 cm       | 221-007-S |  |    | •  |    |
| MKS®<br>Sternalpelotte               | 761-041-S | •  | •  | •  |    |
| MKS®<br>Abdominalplatte              | 761-042-S | ••   | •• | •• |   |
| MKS®<br>Symphysenpelotte             | 761-043-S | •  | •  | •  |  |
| MKS®<br>Thoraxabstützung             | 761-047-S | •  | •  | •  |  |
| MKS® Becken- /<br>Verschlusselement  | 761-046-S | •  | •  | •  |  |
| MKS®<br>Abschlussplatte<br>groß      | 761-044-S |  |    | •  |  |
| MKS®<br>Abschlussplatte<br>klein     | 761-045-S | •  | •  |    |  |
| MKS® Gurtschlaufe<br>zweifach        | 451-001-S | •  | •  | •  |  |
| MKS® Thorecta<br>Gurtset             | 731-gt    | •  | •  | •  |  |
| MKS®<br>Glutaeusspange<br>(optional) | 771-mp01  |  |    |    |  |

# Maßblatt Rumpf

Bei Bestellungen bitte kopieren und ausgefüllt senden.  
 E-Mail: info@albrechtgmbh.com  
 Fax: 08051-961 29 30

Bestellung       Kostenvoranschlag

Datum: \_\_\_\_\_

Sanitätshaus: \_\_\_\_\_


Kundennummer: \_\_\_\_\_

Orthopädietechniker: \_\_\_\_\_

Patienten ID: \_\_\_\_\_

## Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: \_\_\_\_\_

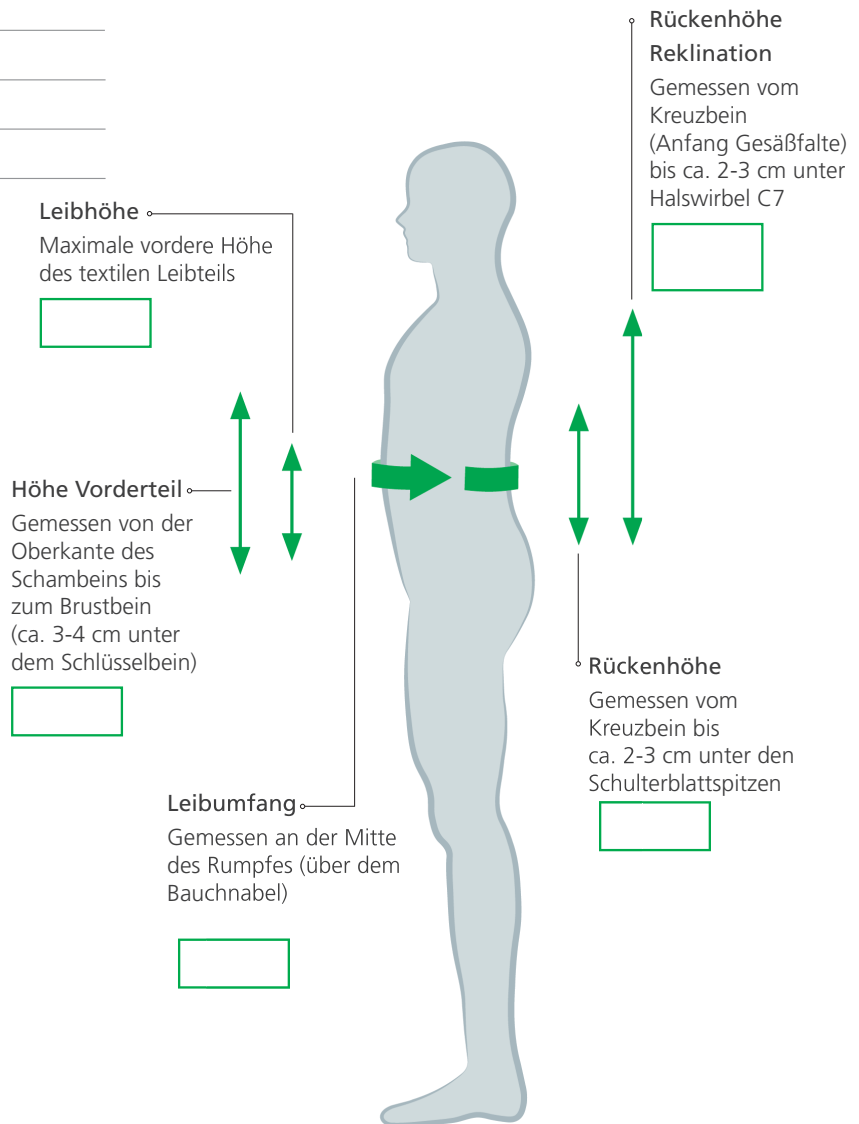

**Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)**

Größenmodifikation

modulare Änderung

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Freigabe: \_\_\_\_\_