

omosan Schultergelenkorthese

Schultergelenkorthese zur Führung und Stabilisierung

HMV-Nr. 23.09.03.0XXX

Indikationen

- Subluxation der Schulter bei Hemiplegie
- Lähmung der schulterumgebenden Muskulatur
- Läsion des Plexus brachialis
- Periphere Nervenschädigung im Bereich der HWS und Schulter
- Leichte bis mittlere Instabilität des Schultergelenks
- Konservativ bei habitueller Schulterluxation
- Entzündungen
- Degeneration

Merkmale

- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Schulterumfassendes Element
- Unterarmmanschette mit einstellbaren Zügeln
- Universalgröße
- Rechts und links anwendbar
- Kombination mit den CDS® Orthesen der oberen Extremität durch das **omosan Schultergelenkorthese Verbindungsset** möglich.

Funktionsweise

Die **omosan Schultergelenkorthese** passt sich durch das teilelastische Bandagenmaterial gut an den Körper an. Das schulterumfassende Material, das auf der anderen Seite über die Achsel mit einem Gurt befestigt wird, sorgt dafür, dass der Humeruskopf wieder in seine ursprüngliche Position gebracht und eine Subluxation verhindert wird. Die Unterarmmanschette mit ihren einstellbaren Zügeln sorgt dafür, dass der komplette Arm in Richtung Kopf gezogen wird.

Größen und Artikelnummern

Bezeichnung	omosan Schultergelenkorthese	omosan Schultergelenkorthese Verbindungsset
Größe	Universalgröße	Universalgröße
Art.-Nr.:	37-7000	37-7100



Die jeweiligen Bohrschablonen finden sie hier



omosan Schultergelenkorthese Verbindungsset

omosan Schultergelenkorthese bietet neue (Verbindungs-) Möglichkeiten

Mit der omosan Schultergelenkorthese in Verbindung mit den CDS®-Orthesen der oberen Extremität, können Patienten von den Fingern bis zum Schultergelenk individuell versorgt werden.

CDS® Handgelenkschiene
Extension / Flexion



CDS® Ellbogenschiene
Extension / Flexion



CDS® Handgelenkschiene DUO
Extension / Flexion



CDS® Ellbogenschiene DUO
Extension / Flexion



CDS® Manusan



CDS® Kombinationsorthese
Ellbogen-Hand
Extension / Flexion



Maßblatt obere Extremität

Bei Bestellungen bitte kopieren
und ausgefüllt senden.
E-Mail: info@albrechtgmbh.com
Fax: 08051-961 29 30

☐ Bestellung ☐ Kostenvoranschlag

Datum: _____

Sanitätshaus: _____

Kundennummer: _____

Orthopädietechniker: _____

Patienten ID: _____

Seite

☐ Links ☐ Rechts

Produktname

- ☐ Elbo-track
☐ CDS® Ellbogenschiene
☐ CDS® Ellbogenschiene DUO
☐ CDS® Sup-Prosan
☐ CDS® Handgelenkschiene
☐ CDS® Handgelenkschiene DUO
☐ CDS® Manusan
☐ Manusan
☐ CDS® Kombinationsorthese
 Ellbogen-Hand
☐ sonstige: _____

Wirkrichtung (bei CDS®)

Ellbogen ☐ Extension ☐ Flexion

Hand ☐ Extension ☐ Flexion

Für Kinder

Farbe

- ☐ Grün  ☐ Blau  ☐ Orange  ☐ Pink 

Größter Umfang
am Oberarm

Größter Umfang
am Unterarm

Länge Oberarm
Innenseite
Mitte Armbeuge bis
Achsel

Mitte Armbeuge

Achsabstand
Mitte Armbeuge bis
Handgelenk

Handbreite

Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

- ☐ Größenmodifikation
☐ modulare Änderung

Art.-Nr.: _____

Freigabe: _____