

GEBRAUCHSANWEISUNG

# ELLBOGENLAGERUNGSSCHIENE

SCHIENE ZUR IMMOBILISIERUNG DES ELLBOGENS



**albrecht**<sup>®</sup>  
FUNKTIONELLE REHABILITATION

# Ellbogenlagerungsschiene

---

## Gebrauchsanweisung

### 1. Einführung

#### 1.1. Vorwort

Unsere Lagerungsschienen dienen zur Lagerung und Immobilisierung bei entsprechender Indikation.

#### 1.2. Kundeninformation

Bitte lesen Sie vor Gebrauch der Schiene diese Gebrauchsanweisung zu Ihrer eigenen Sicherheit aufmerksam und genau durch. Nur wenn alle Anweisungen, Hinweise und Vorgehensweisen gründlich gelesen und verstanden wurden, ist ein bestimmungsgemäßes Benutzen und Bedienen möglich. Sollte in der Gebrauchsanweisung etwas unverständlich sein, oder Anweisungen, Bedienungen oder Sicherheitshinweise nicht völlig klar nachvollziehbar sein, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Fachhandel oder direkt an die albrecht GmbH, bevor Sie die Schiene benutzen. Dies gilt im besonderen Maße für die Sicherheitshinweise.

#### 1.3. Funktionsweise

Die **Ellbogenlagerungsschiene** unterstützt die Behandlung im Versorgungsbereich des Ellbogens des erwachsenen Menschen. Sie dient zur Immobilisierung des Ellbogens.

#### 1.4. Zweckbestimmung

Die Schiene ist ausschließlich für die orthetische Versorgung des Ellbogens einzusetzen.

Die **Ellbogenlagerungsschiene** unterstützt die Behandlung im Versorgungsbereich Ellbogen des erwachsenen Menschen. Sie dient zur Immobilisierung des Ellbogens. Mit Ihrer **Ellbogenlagerungsschiene** sollen Sie eine möglichst selbstständige, Ihren persönlichen Bedürfnissen und Ihrer Leistungsfähigkeit entsprechende Lebensführung erreichen.

#### 1.5. Lieferumfang

Die **Ellbogenlagerungsschiene** wird Ihnen in der bestellten Größe mit Gebrauchsanweisung und Kennzeichnung am Produkt funktionsfertig geliefert.

#### 1.6. Konformitätserklärung

Die albrecht GmbH erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung die Konformität der **Ellbogenlagerungsschiene** mit der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.

#### 1.7. Merkmale

- Kostengünstige Alternative anstelle von Gips
- Rigide Schale aus PE mit hautfreundlicher Polsterung
- Breite Klettbänder zur Fixierung
- Physiologischer Beugewinkel von 58°

---

## Gebrauchsanweisung

### 1.8. Indikationen

Der Arzt entscheidet über die Versorgung anhand seines diagnostischen Befundes.

Allgemein ist die Versorgung mit der **Ellbogenlagerungsschiene** angezeigt bei:

- Postoperativ als Lagerungsschiene
- Bei Lähmung
- Bei entzündlicher, rheumatischer Erkrankung

Bei allen abweichenden Indikationen muss der Arzt gefragt werden.

### 1.9. Kontraindikationen

Die Schiene ist ausschließlich für den Kontakt mit intakter Haut bestimmt.

### 1.10. Sicherheitshinweise

Die optimale Wirkung der Schiene wird nur bei korrekter Anwendung erzielt.

- Die Schiene darf nur im unversehrten, kompletten, mechanisch einwandfreien Zustand sowie kompletter und unbeschädigter Polsterung und Gurtung verwendet werden. Dies ist vor jeder Anwendung durch den Benutzer zu überprüfen.
- Das Offenlassen bzw. Entfernen einzelner oder mehrerer Gurte sowie übermäßiges Lockern der Gurtung während der Benutzung der Schiene führt zur Abnahme des therapeutischen Effektes der Schiene und kann zu Verletzungen führen.
- Die Schiene darf nicht auf offenen Wunden getragen werden.

- Die Haut sollte frei von Ölen, Fetten, Gelen oder anderen Rückständen sein, um Reaktionen der Haut bzw. der Materialstruktur zu vermeiden.
- Die Schiene sollte fest, aber nicht zu eng sitzen, um die Blutzirkulation nicht einzuschränken und die Nervenbahnen und Lymphgefäße nicht zu beeinträchtigen. Übermäßige Kompression ist also zu vermeiden.
- Eine Kombination mit anderen Produkten ist derzeit nicht vorgesehen oder ist mit dem Hersteller in Schrift zu vereinbaren.
- Die Schiene ist nicht für den Einmalgebrauch, jedoch für die mehrmalige Verwendung durch nur eine Person bestimmt.
- Das Produkt wird nicht steril geliefert.
- Bei allergischen Reaktionen setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Arzt in Verbindung.
- Beachten Sie, dass sich Polsterteile, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, aufheizen können. Schützen Sie die Orthese gegebenenfalls vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Zurzeit liegt keine Prüfung auf Entflammbarkeit vor. Lassen Sie bei dem Umgang mit offenen Flammen wie Feuerzeugen und Zigaretten in direkter Umgebung der Orthese Vorsicht walten.

# Ellbogenlagerungsschiene

---

## Gebrauchsanweisung

### 1.11. Garantie

Wir übernehmen die Garantie für die Schiene für den Anwendungszeitraum von 3 Monaten. Die Schiene ist ein medizinisches Rehabilitationsgerät und darf zu keinem anderen als dem in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck verwendet werden. Veränderungen an der Schiene oder anderweitige Anwendungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung der albrecht GmbH. Wird diese nicht eingeholt, kann der Hersteller keine Garantie übernehmen. Bei Verwendung einzelner Gelenke oder Baugruppen sind diese bestimmungsgemäß zu verwenden. Bei Ver- oder Abänderungen (z.B. zusätzliche Befestigungsbohrungen) der Einzelteile oder Komponenten kann vom Hersteller keine Garantie mehr übernommen werden. Das Entfernen oder Beschädigen des QM-Siegels führt zum Erlöschen der Garantie.

### 1.12. Weitergabe

Die Schiene ist nicht für den Einmalgebrauch, jedoch für die mehrmalige Verwendung durch nur eine Person bestimmt. Von einer Weitergabe raten wir ab. Sollte dies dennoch gewünscht sein, beachten Sie vor Weitergabe die Pflege- und Reinigungshinweise und lassen die Schiene durch den autorisierten Fachhandel auf sichere und einwandfreie Funktion hin überprüfen.

### 1.13. Entsorgung

Die Schiene enthält recyclingfähige Materialien ohne toxische oder andere umweltschädigende Stoffe und Substanzen. Sofern sie nicht mit infektiösen Keimen kontaminiert ist, kann sie der normalen Entsorgung zugeführt werden. Um sicher zu gehen, konsultieren Sie Ihr Orthopädiefachgeschäft.

---

## Gebrauchsanweisung

### 2. Anpassung

Insbesondere bei einer Neuversorgung muss der Umgang mit der **Ellbogenlagerungsschiene** erlernt werden. Das An- und Ausziehen muss geübt werden.

Die **Ellbogenlagerungsschiene** kann direkt auf der Haut oder einem faltenfrei eng anliegenden Unterhemd getragen werden. Das Tragen eines saugfähigen Unterhemdes empfiehlt sich, um Feuchtigkeit durch übermäßiges Schwitzen zu vermeiden.

Gehen Sie zum Anziehen der **Ellbogenlagerungsschiene** wie in den folgenden Schritten beschrieben vor. Sie stellen damit die zuverlässige Wirksamkeit sicher.

Die Länge der Gurte muss auf Ihre Größe angepasst werden.

Achten Sie immer darauf, dass die Gurte der **Ellbogenlagerungsschiene** glatt und fest anliegen Sie dürfen jedoch nicht so fest angezogen werden, dass es zu Einschnürungen an den Rändern kommt!

#### 2.1. Anziehenanleitung

- 1 Beim Anlegen der Schiene beugen Sie Ihren Arm im Winkel der Schiene.
- 2 Die Gurte können in der Länge eingestellt und bei Bedarf gekürzt werden.
- 3 Befestigen Sie nun die Gurte in der Reihenfolge von unten nach oben.

Optional auch als Lagerungsschale ohne Polster und Gurte erhältlich.

Ellbogenlagerungsschale →  
(ohne Polster und Gurte)



# Ellbogenlagerungsschiene

## Gebrauchsanweisung



Handwäsche 30°C



Nicht Bleichen



Nicht Bügeln



Nicht chem. Reinigen



Nicht Trockner geeignet

## 3. Reinigung, Wartung und Desinfektion

Die Orthese ist wartungsfrei konzipiert. Um über den Behandlungszeitraum eine einwandfreie Funktionsweise zu gewährleisten, ist die Orthese regelmäßig (mindestens alle 3 Monate) oder bei Bedarf nach den folgenden Anweisungen zu reinigen.

### 3.1. Pflege

- Das Produkt wird nicht steril geliefert und ist für eine Sterilisierung nicht geeignet.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Sämtliche Textilien können bei 30°C mit Wasser und einem milden Waschmittel und/oder Desinfektionsmittel von Hand gewaschen und an der Luft getrocknet werden.
- Keine Maschinenwäsche.
- Die Schale kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
- Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch abwischen.
- Vollständig benetzen, nicht nachwischen.
- Unzugängliche Flächen einsprühen.
- Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten.
- Es wird ein mildes Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis empfohlen.

Bei der Auswahl des Desinfektionsmittels fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker und beachten Sie die Hinweise des Desinfektionsmittelherstellers. Die Robert-Koch-Liste der zugelassenen Desinfektionsmittel finden Sie auf <http://www.rki.de>.

## Gebrauchsanweisung

### 4. Technische Daten / Materialien

Bezeichnung	Material
Schale	PE
Polster	Velours PA
Gurte	Velours PA

### 5. Auswahl der Größe

Die **Ellbogenlagerungsschiene** ist in unterschiedlichen Größen gemäß unten stehender Tabelle erhältlich.

### 6. Artikelnummernübersicht

Ellbogenlagerungsschiene			
Größe	Länge Oberarmschale	Länge Unterarmschale	Art.-Nr.:
S	18 cm	18 cm	37-2091
M	20 cm	20 cm	37-2092
L	22 cm	22 cm	37-2093

Ellbogenlagerungsschale			
Größe	Länge Oberarmschale	Länge Unterarmschale	Art.-Nr.:
S	18 cm	18 cm	37-2091S
M	20 cm	20 cm	37-2092S
L	22 cm	22 cm	37-2093S

**HMV-NR:** 23.10.01.0002

**STAND:** DE 10.2021



**albrecht GmbH**  
CHIEMSEESTRASSE 81  
D-83233 BERNAU AM CHIEMSEE  
TEL +49 (0)8051 96129-0  
FAX +49 (0)8051 96129-30

[INFO@ALBRECHTGMBH.COM](mailto:INFO@ALBRECHTGMBH.COM)  
[WWW.ALBRECHTGMBH.COM](http://WWW.ALBRECHTGMBH.COM)



Made in Germany  
Hergestellt in Deutschland



Management  
System  
EN ISO  
13485:2016

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 000046096